



**NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ**  
**STERİLİZASYON ÜNİTESİ KESME KAPAMA MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI**

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
DS.TL.04	ARALIK 2023	0	0	1

## 1. AMAÇ

1.1. Buhar otoklava konulacak cerrahi aletlerin uygun şekilde paketlenmesi için kesme kapama cihazlarının kullanımının sağlanmasıdır.

## 2. KAPSAM

2.1. MSÜ Çalışanları

## 3. TANIMLAR

3.1. Cihazlar

### 3.2. Temel İlkeler:

#### Otomatik Kesme Kapama Cihazı

- 1.Cihazın fişi takılır.
- 2.Sağ yan tarafından power tuşuna basılıp, cihaz açılır.
- 3.Kullanıcı Adı ve Şifre girilir.
- 4.Validasyon test süresi beklenir.
- 5.Cihazın sıcaklık uygun dereceye geldiğinde kullanılmaya başlanır.
- 6.Haftalık cihazın conta, lastik ve kayışları conta spreyi ile yağlanır.

#### Manuel Kesme Kapama Cihazı

- 1.Cihazın fişi takılır.
- 2.Sağ yan tarafından power tuşuna basılıp, cihaz açılır.
- 3.Cihazın sıcaklık uygun dereceye geldiğinde kullanılmaya başlanır.
- 4.Paket kağıtları cihaza yerleştirilir. Cihaz üstündeki kol sağa kaydırılarak kesme işlemi gerçekleştirilir.
- 5.Cerrahi aletler pakete yerleştirildikten sonra yandaki kol aşağı çekilir ve ses gelmesi beklenir. Kapama işlemi tamamlanır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan