



**NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ**  
**STERİLİZASYON ÜNİTESİ CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI**

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
DS.TL.02	ARALIK 2023	0	0	1

### 1. AMAÇ

1.1. Steril edilmek üzere teslim alınan malzemenin temizliğini ve dekontaminasyonunu sağlamak ve Cerrahi alet yıkama makinasını uygun kullanmak.

### 2. KAPSAM

2.1. MSÜ Çalışanları

### 3. TANIMLAR

3.1. Cihazlar

3.1.1. Termal dezenfektör: Cerrahi aletlerin yıkama ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

#### 3.2. Temel İlkeler:

1.Cihazın çalıştırma kontağı sağa doğru çevrilir, cihaz açılır.

2.Sepet ünitesi dışarıya çıkarılıp, kirli malzemeler yerleştirilip ünite tekrar içeriye gönderilir.

3.Yıkama cihazı indikatörü sepet içerisine holderi ile beraber yerleştirilir.

4.Kirli alandaki ekranda 'Kapı Kapat' tuşuna basılıp kapı kapatılır.

5.'Kapı Kapat' tuşuna basılıp, ekrandan yıkama programı seçilip makine çalıştırılır.

6.Yıkama bittikten sonra temiz alandan 'Kapı Aç' tuşuna basılıp kapı açılır ve yıkama rapor fişi kontrol edilir, yıkama indikatörü geçmiş ise malzemeler çıkarılır.

7.Cihaz kontağı sola doğru çevrilir, cihaz kapatılır.

8.Yıkama indikatörü ve cihazın print çıktıları *DS.FR.03 YIKAMA CİHAZI İNDİKATÖR TAKİP FORMU* na kat edilir.

8.Cihazda kullanılan Alkali ve Nötrölizan solüsyonlar haftalık kontrolleri sağlanır, *DS.FR.07 YIKAMA MAKİNASI SOLÜSYONU KONTROL VE DEĞİŞİM FORMU* na kayıtları tutulur.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan