



**NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  
**AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ**  
**STERİLİZASYON ÜNİTESİ BUHAR OTOKLAV MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI**

Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
DS.TL.03	ARALIK 2023	0	0	1

## 1. AMAÇ

1.1. Buhar otoklav cihazlarının etkin ve kontrollü kullanımını sağlamak.

## 2. KAPSAM

2.1. MSÜ Çalışanları

## 3. TANIMLAR

3.1. Cihazlar

3.1.1. Sterilizasyon: Aletler üzerindeki mikroorganizmaların sporlar dahil tamamının ölümünü gerçekleştirme işlemidir.

### 3.2. Temel İlkeler:

1.Cihazın çalıştırma kantağı sağı doğru çevrilir, makine açılır.

2.Cihazın sağı alt kısmında bulunan hava, su vanası açılır.

3.Giriş ve çıkış kapıları açılıp, contaları conta spreyi ile yağlanır.

4.Günlük Bowie-Dick testi yapılır.

5.Haftalık Kaçak testi yapılır.

6.Malzemeler cihaza yükleme yapılmadan önce kimyasal ve biyolojik indikatörler otoklava yerleştirilir.

7.Ortalama 15-20 dk içinde cihaz hazır olur ve ana ekranda 'Sistem Hazır' uyarısı geldiğı vakit içerisine malzemeler konup kapaklar kapatılır.

8.İçine koyulan malzemelerin uygunluğına göre Ana Ekrandan program seçilip cihazda START tuşuna basılarak çalıştırılır.

9.Cihazda arıza durumu ile karşılaşıldığında veya cihaz uyarı ikaz sesi verdiğinde kırmızı butonlu STOP tuşuna basılır. Teknik servise arıza bildirimini yapılır.

10.Otoklav süresi bittikten sonra temiz alana açılan kapak otomatik açılır.

11.Otoklav rapor fişi alınır. İndikatörler kontrolleri sağlanarak *DS.FR.01 BUHAR OTOKLAV İNDİKATÖR TAKİP FORMU* na kayıtları tutulur.

12.Hava, su vanası kapatılır.

13.Cihazın kontak anahtarı sola doğru çevrilip cihaz kapatılır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan