



**NIĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KURŞUN ÖNLÜK KONTROL TALİMATI**

|              |              |             |                 |          |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| Doküman Kodu | Yayın Tarihi | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Sayfa No |
| RG.TL.04     | ARALIK 2023  | 0           | 0               | 1 / 1    |

1. AMAÇ: Fakültemizde radyoloji biriminde kullanılmakta olan kurşun önlüklerin kırılma, katlanma gibi nedenlerle hasar görmemelerini sağlamak ,sorun olan ekipmanların tespitini sağlamak

2.SORUMLULAR: Radyasyon güvenliği komitesi ve birim çalışanları sorumludur.

### 3.UYGULAMA

3.1. Radyoloji Sorumlu Teknisyeni/teknikeri tarafından fakültede ilgili birimlerde bulunan tüm kurşun önlüklerin envanteri çıkarılır.

3.2. Radyoloji Sorumlu Diş Hekimi ve Radyoloji Sorumlu Teknisyeni/teknikeri, kullanılmakta olan

kurşun önlüklerin kırılma, katlanma gibi sebeplerle hasar görmemeleri için kurşun önlüklerin uygun bir biçimde (düzgün ve katlanmayacak) muhafaza edilmesini temin etmek üzere gerekli çalışmaları yapar.

3.3. Radyoloji Sorumlu Teknisyeni/teknikeri Radyasyon uygulaması yapılan tüm birimlerde bulunan kurşun önlüklerin yılda iki kez kontrolünü yapar ve yaptığı kontrolleri “Kurşun Önlük Kontrol

Formuna” kaydeder.

3.4. Yılda iki kez kurşun önlüklerin mevcut olan en büyük ebatta kasete tüm alanları X ışını ile görünür hale getirilebilecek şekilde direk grafi çekimleri yapılır veya uygun bir durumda Uzman Doktor gözetiminde skopi altında incelenir.

3.5. Direkt Grafi çekimleri Radyoloji Sorumlu Uzman Hekimi tarafından kontrol edilir ve uygunluğu onaylanır.

3.6. Radyoloji Sorumlu Diş Hekimi tarafından kurşun önlük inceleme sonuçları Kurşun Önlük Kontrol Formuna kaydedilir. Fakültemizdeki önlük yerleri ve sayıları ;

| BULUNDUĞU BİRİM | KORUYUCU EKİPMAN     | NUMARA |
|-----------------|----------------------|--------|
| PERİAPİKAL      | KURŞUN ÖNLÜK         | 1      |
|                 | TROİD KORUYUCU       | 1      |
| PANAROMİK       | KURŞUN ÖNLÜK         | 2      |
|                 | TROİD KORUYUCU       | 2      |
|                 | KURŞUN ÖNLÜK         | 3      |
|                 | TROİD KORUYUCU       | 3      |
|                 | ÇOCUK KURŞUN ÖNLÜK   | 4      |
|                 | ÇOCUK TROİD KORUYUCU | 4      |
| TOMOĞRAFİ       | KURŞUN ÖNLÜK         | 5      |
|                 | TROİD KORUYUCU       | 5      |
|                 | ÇOCUK KURŞUN ÖNLÜK   | 6      |
|                 | ÇOCUK TROİD KORUYUCU | 6      |

|            |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
|            |              |           |