



**DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ DEKANLIĐI**  
**CERRAHİ ALETLERİN PAKETLENMESİ TALİMATI**

**AMAÇ:** Dekontaminasyonu yapılan cerrahi aletlerin standartlara uygun paketlenmesini sağlamak.

**UYGULAMA ALANI:** Sterilizasyon Birimi Çalışanları

**SORUMLULUKLAR:**

**TANIMLAR:**

**FAALİYET AKIŐI:**

- Paketlenecek alet ve malzemenin temiz ve kuru olduğundan emin olunur.
- Aletlerin kırık, bozuk ve kirli olup olmadıkları ve fonksiyonları kontrol edilir, gerekirse eklem aralarına bakım spreyi sıkılır.
- Cerrahi aletler tek diŐ olarak kilitlenir.
- Her paket içine kimyasal indikatör konulur.
- Sterilizasyon rulosu ile paketlenen aletler tek paket yapılarak paketlenir.
- Paketlenen cerrahi aletler üzerine paket içeriĐi, klinik adı, sterilizasyon işlemini yapan personel adı/kodu yer alır.
- Paketlenmiş alet setinin (tepsi aletler ve bohça) aĐırlığı 7 kiloyu geçmemelidir.

|   |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| Hazırlayan<br><b>Birim Kalite Komisyonu</b> | Kalite Sistem Onayı | Yürürlük Onayı |
|---|---------------------|----------------|